



ATENA

6 in 1



ATENA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: ATENA

Potenza: 60W

Alimentazione: 220V 60Hz

Peso Lordo: 12 Kg

Tecnologie: Ossigenoterapia, Micro-Dermoabrasione, Elettroporatore Meso, Manipolo Caldo/Freddo, RF Bipolare, Lifting Viso "V"

- 1- Manipolo Caldo/Freddo: da 0 a 50 gradi centigradi
- 2- Micro-Dermoabrasione: 1,8 Kpa
- 3- Ossigenoterapia: 3,45 Kpa
- 4- RF Bipolare: 5,1 Hz
- 5- Elettroporatore Meso: 2,15 W
- 6- Lifting Viso "V": 4,2 W

Principio di Funzionamento

Questa apparecchiatura combina tecnologie di RF, EMS, micro-corrente, trattamento con ossigeno, pulizia con acqua ossigenata e manipolo freddo/caldo per ottenere effetti visibili di rassodamento, lifting, pulizia, sbiancamento e idratazione della pelle, rimozione di rughe e occhiaie, ecc.

Manipolo freddo e caldo: Da circa 0° (aiuta a rassodare la pelle, a mantenere l'elasticità e a lenire gli arrossamenti) Fino a circa 50° (aiuta a rilassare i muscoli, alleviare il dolore, assorbire più rapidamente i prodotti per la cura della pelle, rendendola più elastica e idratata).

Micro-Dermoabrasione: sonda elicoidale con forte aspirazione. Lenisce gli effetti dell'invecchiamento ed elimina la cutina necrotica, i punti neri e l'acne, mentre i nutrienti vengono veicolati negli strati della pelle.


Ossigenoterapia: compressione dell'aria fino a una purezza > 95% di ossigeno, quindi rilascio con sostanze nutritive alla pressione di 0,2 Pa.

RF Bipolare: Penetra la barriera del melanoforo epidermico basale e riscalda le fibre di collagene dermico a 55 °C -65 °C per accelerare la contrazione.

Elettroporatore Meso: attiva le cellule muscolari per assorbire più energia e bruciare più calorie.

Lifting Viso: aumenta la composizione di ATP, collagene e fibra muscolare, migliorando la permeabilità cellulare.

ATENA

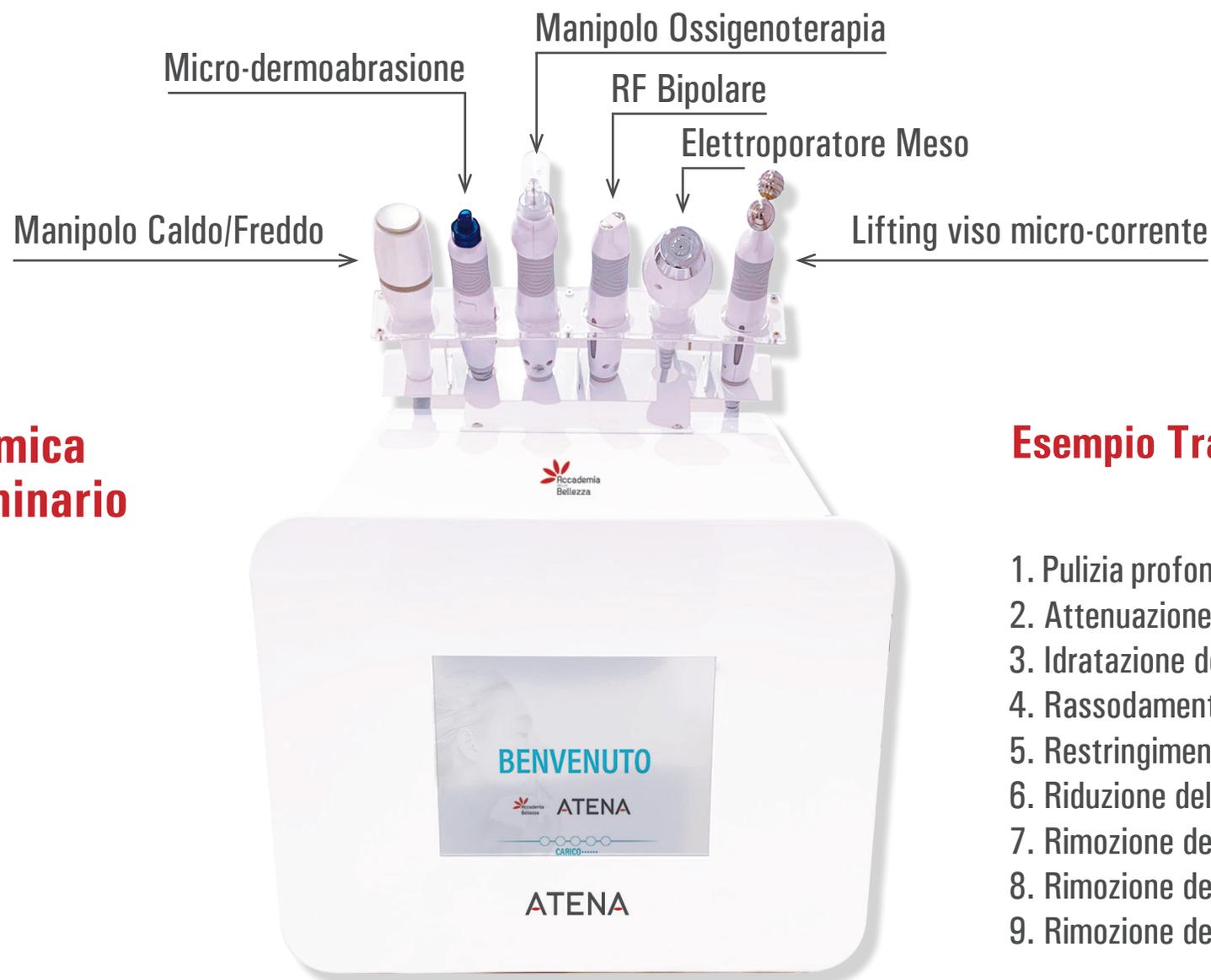

Panoramica del Macchinario

Esempio Trattamenti

1. Pulizia profonda della pelle
2. Attenuazione macchie
3. Idratazione della pelle
4. Rassodamento della pelle
5. Restringimento dei pori
6. Riduzione del gonfiore
7. Rimozione delle occhiaie
8. Rimozione delle rughe
9. Rimozione dell'acne

ATENA



Bottiglia "D"
Ossigenatore Acqua

Raccolta acqua residua
di trattamento

Ingresso Acqua

Valvola Scarico "troppo pieno"

Scarico Acqua

Flusso del liquido
Micro-Dermoabrasione



ATENA



Micro-Dermoabrasione

Con la nuova funzione di riscaldamento, forte aspirazione e sonda elicoidale, realizza una pulizia più profonda, favorendo l'assorbimento del prodotto per la cura della pelle. Riduce al minimo i pori dilatati, ammorbidisce la cutina, illumina il tono della pelle e ne migliora l'elasticità.

ATENA



Manipolo Elettroporatore Mesoterapia

Design a pompa peristaltica. I nutrienti verranno veicolati negli strati più profondi della pelle regalando, lucentezza, idratazione e morbidezza.



Radiofrequenza Bipolare

Aiuta a contrastare la perdita di tono e i segni del tempo. (zampe di gallina, solchi naso labiali, etc.)

Manipolo "V" per lifting viso con microcorrente

Design a doppia sfera con rilascio microcorrente 360°, stimola la pelle per favorire l'assorbimento, il rimodellamento del viso a V, l'attenuazione delle rughe, il rassodamento della pelle.



Ossigenoterapia

Combinandosi con i principi attivi della soluzione, l'ossigeno apporta nutrienti e acqua alle cellule sotto forma di micro-nebulizzazione ad alta pressione.



ATENA



Manipolo Caldo / Freddo

Da circa 0° (aiuta a rassodare la pelle, a mantenere l'elasticità e a lenire gli arrossamenti)

Fino a circa 50° (aiuta a rilassare i muscoli, alleviare il dolore, assorbire più rapidamente i prodotti per la cura della pelle, rendendola più elastica e idratata).

Caratteristiche Salienti:

1. Tecnologie multiple - Pulizia con acqua ossigenata + RF Bipolare + Elettroporatore Meso + Lifting Viso + Trattamento con ossigeno + Manipolo freddo e caldo.
2. Nuova funzione di riscaldamento - migliore esperienza d'uso ed effetto finale.
3. 6 sonde con 6 modalità - molteplici effetti di pulizia profonda della pelle, lifting, idratazione, schiarimento, rughe, acne, rimozione delle occhiaie, restringimento dei pori, etc.
4. Facile da usare - comodo da usare grazie all'ampio touch screen.
5. Sicuro e confortevole - non invasivo, adatto alla routine quotidiana di bellezza di ogni tipo di pelle.
6. Qualità affidabile - realizzato in materiali di alta qualità con un anno di garanzia.

Primo avvio della macchina

(SEGUI IL QR IN COPERTINA)

1-Installazione Manipoli Lo spinotto di ogni manipolo può essere inserito correttamente soltanto nel proprio alloggiamento. Non forzare lo spinotto se non entra agevolmente, ma controllare che il numero di spine corrisponda al numero di fori nell'alloggiamento nel quale si sta tentando di inserire la presa.


2-Caricamento Acqua Riempire il serbatoio con acqua distillata utilizzando il tubo e l'imbuto incluso. Se il serbatoio interno viene riempito eccessivamente, l'acqua fuoriuscirà dalla valvola "troppo pieno". Per svuotare la macchina, in caso di trasporto, utilizzare l'apposita valvola.

3-Caricamento prodotti cosmetici nei manipoli o nelle bottiglie esterne (per la micro-dermoabrasione, avvitare le bottiglie con i prodotti per la pulizia viso abbinandoli con la lettera corretta. Per la lettera 'D', utilizzare SOLO acqua distillata).

4-Accensione e scelta del trattamento tramite Touch Screen (in caso di micro-dermoabrasione, scegliere anche il prodotto da utilizzare).

5-Avvio del Trattamento Dopo aver scelto la durata del trattamento, premere il pulsante START, quindi, se previsto dal trattamento scelto, settare temperatura e/o potenza del trattamento.

Fare riferimento al video tutorial per le modalità di utilizzo dei manipoli e tutte le altre informazioni.

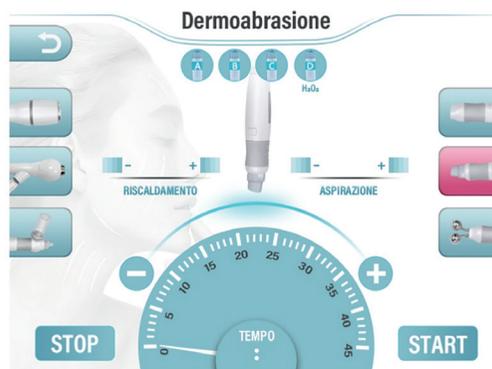



Accademia
DELLA
Bellezza